



Płynny komponent do termicznego przygotowania np. kaczek, basenów, itp. oraz do zmiękczenia wody

## thermosept® SEK

### Zalety preparatu

- usuwa osady wapienne
- po wyschnięciu nie pozostawia plam

### Typ preparatu

thermosept® SEK jest płynnym preparatem neutralizującym, zmiękczącym i płuczącym (w postaci koncentratu) na bazie kwasów organicznych.

### Zastosowanie

Preparat thermosept® SEK przeznaczony jest do termicznego przygotowywania do ponownego użycia basenów, kaczek szpitalnych itp. oraz do zmiękczenia wody.

### Dane dotyczące produktu

Skład: 15-30% niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne i związki uzupełniające.

#### Dane fizykochemiczne

Koncentrat:

Wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz

Gęstość (20°C): 1,08 g/cm<sup>3</sup>

Wartość pH: ok. 2

1 % roztwór użytkowy:

Wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz

Wartość pH: ok. 4,5

### Stężenia użytkowe

0,1-0,3%, tzn. 1-3 ml na litr wody względnie 0,01% na 1° dH.

Dozowanie preparatu odbywa się za pomocą automatycznej pompy dozującej stanowiącej wyposażenie urządzenia.

### Informacja dotycząca ochrony środowiska

Schülke & Mayr dysponuje opatrzonym certyfikatem systemem zarządzania procesami ochrony środowiska w myśl rozporządzenia w sprawie audytów w zakresie ekologii (nr rej. DE-S-150 00003).

### Informacja dotycząca opakowań

5 kg kanister. Pojemniki wykonane są z polietylenu (HDPE) i są odpowiednio oznakowane. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe sortowanie i optymalne odzyskiwanie / przetwarzanie. Zamknięcie wykonano z PE wzgl. z HDPE (kanister). Etykietę wykonano z PE. Opakowania S&M nie zawierają PCV.

### Oznakowanie zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (dotyczy koncentratu):

- Xi:** Produkt drażniący.  
**R36:** Działa drażniąco na oczy.  
**S26:** Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

### Podatność na rozkład biologiczny

thermosept® SEK podlega pełnej i łatwej biodegradacji

### Trwałość koncentratu

Okres gwarancji / termin ważności: 3 lata.



### Wytwórca

Schülke & Mayr GmbH  
Robert Koch Strasse 2  
22840 Norderstedt, Niemcy

### Dystrybucja

Schulke Polska Sp. z o.o.  
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  
tel.: 022 568 22 02, fax: 022 568 22 04  
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl

# thermosept® alka clean forte