

Aktywator do
**Sekuseptu®
Pulver**

(poszerza spektrum
działania preparatu
o Tbc i spory)


Skład:

Kwas fosforowy, tenzyd
niejonowy, inhibitory
korozji, substancje wspo-
magające mycie, barwnik.

Sposób użycia:

Przygotować 2% roztwór
Sekuseptu Pulver. Po upływie
15 minut na każdy litr
Sekuseptu Pulver dodać 5 ml
aktywatora i krótko zamieszać.
Dodanie aktywatora powoduje
przejściowe, trwające ok. 30 min.
zabarwienie roztworu na niebiesko.

**Odbarwienie roztworu nie oznacza
utrąty jego aktywności!**

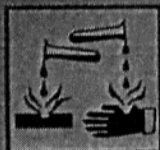

Substancja żrąca

Środki ostrożności:

R34 - Wywołuje
oparzenia.

S26 - W przypadku
zanieczyszczenia
oczu przemyć
natychmiast dużą

ilością wody, zwrócić się o pomoc
lekarską.

S28 - Zanieczyszczoną skórę
natychmiast przemyć dużą ilością
wody.

Przechowywać w miejscach niedo-
stępnych dla dzieci.

Przechowywać w chłodnym miejscu
w oryginalnych opakowaniach.

Koncentratu nie wylewać do ścieku.

**ASS 4
Poj. 2 l**

**Dopuszczony do obrotu
na terenie RP przez PZH
- opinia nr HB/783/00**

Data ważności:

Nr serii:

ECOLAB®

Producent:
Ecolab GmbH & Co. OHG
P.O. Box 130406
D-40554 Düsseldorf

Informacja naukowa:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków

ASS 4 IF/ 100602PL