

schülke -+



Bezalkoholowy preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania

mikroqid® sensitive wipes

Zalety

- bezalkoholowe
- szybkie działanie
- natychmiastowa możliwość użycia
- szerokie spektrum bójcze
- pH 6,0
- doskonałe właściwości czyszcząco-dezynfekujące

Dane dotyczące produktu

100 g roztworu substancji czynnych zawiera: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetyloamoniowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetyloamoniowy.

Dane fizykochemiczne

Gęstość (20°C):	ok. 0,998 g/cm ³
Trwałość w temperaturze:	-5°C do +40°C

Czas oddziaływania

Skuteczność	Czas oddziaływania
bakterie, grzyby, ograniczona skuteczność wirusobójcza ¹ (w tym HIV, HBV i HCV ³), Rota, Vaccinia, Papowa SV40	60 sekund
Noro ⁴	30 minut
Tbc ²	
- bez obciążenia białkowego M. terrae:	15 minut
- z obciążeniem białkowym M. terrae, M. avium:	60 minut

¹ zgodnie z zaleceniami RKI, Bundesgesundheitsblatt (Monitor Federalnego Ministerstwa Zdrowia) 01/2004; ² CHEMILA – Laboratorium nr 1273 wg czeskiego instytutu akredytującego 30.05.2008; ³ w zastępstwie użyto wirusa BVDV; ⁴ w badaniu użyto mysiego norowirusa (MNV).

Właściwości użytkowe

mikroqid® sensitive wipes wykonane są z włókniny wiskozowej nasyczonej płynem dezynfekującym. Opakowanie zawiera 200 szt. gotowych do użycia nasączonych chusteczek o wymiarach 20x20 cm, odrywanych pojedynczo. Chusteczki mają zastosowanie do dezynfekcji w ramach codziennej higieny małych powierzchni: do czyszczenia sprzętów szpitalnych, aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, termometrów, słuchawek lekarskich itp. oraz przedmiotów nie medycznych np. słuchawek telefonicznych a także przedmiotów w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych.

Sposób użycia

Powierzchnie wytrzeć dokładnie nasączoną chusteczką, zwrócić uwagę na dokładne nawilżenie całej powierzchni, pozostawić do wyschnięcia. Produkt przeznaczony szczególnie do powierzchni akrylowych (pleksiglas) i innych powierzchni z tworzyw sztucznych wrażliwych na działanie alkoholi. Po użyciu zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie wieczka. Po wyczerpaniu się zawartości opakowania można je uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej.

Formy opakowania

- dozownik z 200 nasączonymi chusteczkami z włókniny wiskozowej
- wkłady w torebce foliowej z 200 nasączonymi chusteczkami z włókniny wiskozowej

Uwagi

Do użytku zewnętrznego. Nie dotykać do oczu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zasobnik należy szczelnie zamykać. Tylko całkowicie opróżnione opakowanie można oddać celem przeprowadzenia recyklingu. Nie używać po upływie terminu ważności.

Trwałość koncentratu

Okres gwarancji / termin ważności: dozownik – 2 lata, wkłady – 2 lata.

Certyfikat

CE 0297

Wytwórca

Schülke & Mayr GmbH,
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

Dystrybutor

Schulke Polska Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
tel.: 022 568 22 02, fax: 022 568 22 04
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl