

Doza TRISTEL FUSE 1 koncentrat

Wysoce skuteczny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni
– sporobójczy, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy

1

litr gotowego
roztworu



WYSOCE SKUTECZNY KONCENTRAT DO MYCIA I DEZYNFEKcji POWIERZCHNI MEDYCZNYCH:

- sale operacyjne
- strefa transfuzji krwi
- oddziały intensywnej opieki
- oddziały oparzeniowe
- onkologia
- pediatria

- stojaki do kroplówek
- ramy łóżek
- szafki
- stoły
- powierzchnie robocze (wycierane na mokro)

Każda saszetka zawiera:

- 50 ml roztworu bazowego (1% roztwór kwasu cytrynowego)
- 50 ml roztworu aktywatora (2,1% roztwór chlorynu sodu)

100ml dwutlenku chloru w roztworze wodnym do rozcieńczenia z wodą w proporcjach: **1 saszetka na 900ml wody.**

Informacje o produktach: www.tristel.pl

Dwutlenek chloru jest skuteczny przeciw:

Spory	<i>Bacillus cereus</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i>
Prątki	<i>Avium</i> <i>Terrae</i> <i>Tuberculosis</i>
Wirusy	<i>Adenovirus</i> <i>Hepatitis</i> <i>Herpes</i> <i>HIV</i> <i>Orthopox</i> <i>Polio</i>
Grzyby	<i>Aspergillus niger</i> <i>Candida albicans</i>
Bakterie	<i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Gentamicin resistant</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>MRSA</i> <i>Vancomycin resistant</i> <i>Enterococcus faecium</i>

Uwagi dotyczące stosowania:

S 1/2 Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 50 Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami
Dwutlenek chloru Nr CAS: 10049-04-4

Tristel

Jak używać dozy TRISTEL FUSE 1 do mycia i dezynfekcji powierzchni



Weź jedną saszetkę w celu przygotowania **1 litra** preparatu do dezynfekcji



Zegnij w pół i ściśnij jedną stronę saszki do momentu pęknięcia środkowego zgrzewu, w celu wymieszania obu zawartości, która zacznie nabierać żółtego koloru




Potrząśnij saszetką w obydwie strony przez 60 sekund



Utnij róg saszki



Wlej zawartość saszki do **900ml** wody

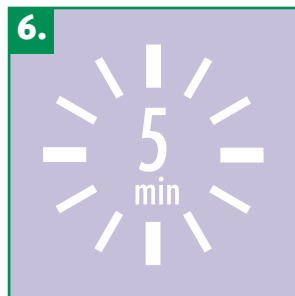

Nanieś na powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia



Wyprodukowano przez:

Tristel Solutions Limited
CB8 7NY, U.K.

Dystrybutor w Polsce:

JAVEL POLSKA
ul. Cietrzewia 34
02-492 Warszawa
www.tristel.pl



10°C - 35°C



CE
0086

TRIS/RS/199