

Doza TRISTEL FUSE 5 koncentrat

Wysoce skuteczny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni
– sporobójczy, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy

5

litrów gotowego
roztworu



WYSOCE SKUTECZNY KONCENTRAT DO MYCIA I DEZYNFEKcji POWIERZCHNI MEDYCZNYCH:

- materace łóżek szpitalnych (PVC)
- stojaki do kroplówek
- ramy łóżek
- stoły sal operacyjnych
- sterylne wózki na salach operacyjnych
- oświetlenie (lampy) sal operacyjnych
- inkubatory

Każda saszetka zawiera:

- 50 ml roztworu bazowego
(5% roztwór kwasu cytrynowego)
- 50 ml roztworu aktywatora
(2,1% roztwór chlorku sodu)

100ml dwutlenku chloru w roztworze wodnym do rozcieńczania z wodą w proporcjach: **1 saszetka na 4,9 litrów wody.**

Dwutlenek chloru jest skuteczny przeciw:

Spory	<i>Bacillus cereus</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i>
Prątki	<i>Avium</i> <i>Terrae</i> <i>Tuberculosis</i>
Wirusy	<i>Adenovirus</i> <i>Hepatitis</i> <i>Herpes</i> <i>HIV</i> <i>Orthopox</i> <i>Polio</i>
Grzyby	<i>Aspergillus niger</i> <i>Candida albicans</i>
Bakterie	<i>Enterococcus faecium</i> <i>VRE</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>GRP</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>MRSA</i>

Uwagi dotyczące stosowania:

S 1/2 Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 50 Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami
Dwutlenek chloru Nr CAS: 10049-04-4

Jak używać dozy TRISTEL FUSE 5 do mycia i dezynfekcji powierzchni



1. Weź jedną saszetkę w celu przygotowania **5 litrów** preparatu do dezynfekcji



2. Zegnij w pół i ściśnij jedną stronę saszetki do momentu pęknięcia środkowego zgrzewu, w celu wymieszania obu zawartości, która zacznie nabierać żółtego koloru



3. Potrząśnij saszetką w obydwie strony przez 60 sekund



4. Utnij róg saszetki



5. Wlej zawartość saszetki do **4,9 litrów** wody



6. Nanieś na powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia



Wyprodukowano przez:

Tristel Solutions Limited
CB8 7NY, U.K.

Dystrybutor w Polsce:

JAVEL POLSKA
ul. Cietrzewia 34
02-492 Warszawa
www.tristel.pl

