



## JASOL SOLID

### PRAKTYCZNY O SZEROKIM ZAKRESIE DZIAŁANIA

Preparat na bazie aktywnego chloru o szerokim spektrum działania służący do dezynfekcji czystych i zanieczyszczonych organicznie powierzchni i sprzętu, wszystkich zmywalnych powierzchni mających kontakt z żywnością, do dezynfekcji sanitariatów, pomieszczeń i przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną. Preparat może być stosowany do dezynfekcji wody pitnej i w basenach kąpielowych.

#### Skład preparatu:

- 100 g zawiera 86,60 % dichloroizocyjanuranu sodu oraz substancję dodatkową
- 1 tabletkę o masie 3,2 g (średnica 20 mm, grubość 8mm) zawiera 1,5 g aktywnego chloru

### OPIS PRODUKTU:

- szerokie spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy-Polio, prątki, spory (*Clostridium difficile*)
- 1 tabletkę o masie 3,2 g zawiera 1,5 g chloru aktywnego
- precyzyjne dawkowanie i niski koszt roztworu
- roztwór wodny z tabletek o niewyczuwalnym zapachu chloru
- tabletki dobrze rozpuszczają się nawet w twardej wodzie
- preparat łatwy w użyciu, wygodny w transporcie i przechowywaniu

### PRODUKT POSIADA:

- pozwolenie MZ nr 0611/04 na obrót produktem biobójczym
- opinia PZH nr HŻ/12257/02
- atest higieniczny PZH nr HK/W/0618/01/2010
- opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego nr 2422/2003/ZM

### WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ:

- 150g - 48 tabletek x 3,2g (w kartonie 24 opakowania)
- 1 kg - 320 tabletek x 3,2g (w kartonie 6 opakowań)

### WAŻNOŚĆ PREPARATU:

- (nakrętka nr serii, data ważności m-c, rok)
- OKRES WAŻNOŚCI: 3 LATA /nie otwartego opakowania/.
- OKRES WAŻNOŚCI: 1 ROK /otwartego opakowania/.





## SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór roboczy preparatu sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

Należy przestrzegać czasu kontaktu 15 minut.

Tabletki rozpuścić w odpowiedniej ilości wody zgodnie z wytycznymi w tabeli. (patrz tabela)

Rozlaną krew, wydzieliny, wydaliny dezynfekować poprzez zalanie roztworem

o stężeniu 10 000 ppm aktywnego chloru (1,80%) – 1 tabletkę na 150 ml wody.

Po 15 minutach usunąć zanieczyszczenie jednorazowym ręcznikiem, a powierzchnie

ponownie zdezynfekować roztworem przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni czystych.

Rękawice i wszystkie inne materiały użyte do dezynfekcji traktować jako materiał skażony.

## ZAKRES DZIAŁANIA: Służba Zdrowia

Stężenie aktywnego chloru	0,18% - 1 000 ppm	0,36% - 2 145 ppm	1,08% - 6 070 ppm	1,80% - 10 000 ppm	1,80% - 10 000 ppm Clostridium difficile
Spektrum działania:	B, F, V	B, Tbc, V, F	B, Tbc, V, F (Z)*	B, Tbc, V, F (Z)*	Clostridium difficile
Czas:	<b>15 minut</b>	<b>15 minut</b>	<b>15 minut</b>	<b>15 minut</b>	<b>15 minut</b>
Ilość tabletek / ilość wody	powierzchnie czyste	powierzchnie czyste	powierzchnie zanieczyszczone organicznie	powierzchnie zanieczyszczone organicznie, krew, wydzieliny, wydaliny	powierzchnie zanieczyszczone organicznie
	1 tab. / 1,5 l wody	1 tab. / 700 ml wody	1 tab. / 250 ml wody	1 tab. / 150 ml wody	9 tab. / 1,0 l wody
	2 tab. / 3,0 l wody	2 tab. / 1,4 l wody	2 tab. / 500 ml wody	2 tab. / 300 ml wody	
	3 tab. / 4,5 l wody	3 tab. / 2,1 l wody	3 tab. / 750 ml wody	3 tab. / 450 ml wody	
	4 tab. / 6,0 l wody	4 tab. / 2,8 l wody	4 tab. / 1,0 l wody	4 tab. / 600 ml wody	
	5 tab. / 7,5 l wody	5 tab. / 3,5 l wody	5 tab. / 1,25 l wody	5 tab. / 750 ml wody	
	6 tab. / 9,0 l wody	6 tab. / 4,2 l wody	6 tab. / 1,5 l wody	6 tab. / 900 ml wody	
	7 tab. / 10,5 l wody	7 tab. / 4,9 l wody	7 tab. / 1,75 l wody	7 tab. / 1,05 l wody	
	8 tab. / 12,0 l wody	8 tab. / 5,6 l wody	8 tab. / 2,0 l wody	8 tab. / 1,2 l wody	
	9 tab. / 13,5 l wody	9 tab. / 6,3 l wody	9 tab. / 2,25 l wody	9 tab. / 1,35 l wody	
10 tab. / 15,0 l wody	10 tab. / 7,0 l wody	10 tab. / 2,50 l wody	10 tab. / 1,5 l wody		

**(Z)\* - w obecności zanieczyszczeń organicznych**

Producent JASOL S.A.  
49 Avenue Franklin Roosevelt  
77210 AVON  
FRANCJA

Importer - Podmiot odpowiedzialny  
Biuro Handlowe  
Wiesław Bednarski  
ul. Januszowicka 11 D/5  
53-135 Wrocław

[www.jasol.pl](http://www.jasol.pl)