

ULTRAAKTYWATOR C € 0434

Ultraaktywator rozszerza spektrum działania roztworu polsept[®] HOLIFA[®] o Tbc i spory.

SKŁAD:

Kwas fosforowy <10%, niejonowe tenzydy <5%, inhibitory korozji, barwnik.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na każdy litr 2% roztworu Polsept Holifa po 15 minutach od sporządzenia dodać 20 ml Ultraaktywator. Stężenie końcowe Ultraaktywator w roztworze wynosi 2%. Wskaźnikiem dodania Ultraaktywator jest tymczasowa zmiana barwy roztworu na kolor niebieski.

Utrata koloru przez roztwór nie jest tożsama z brakiem jego aktywności.

Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu Polsept Holifa.

OSTRZEŻENIA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.



Xi

drażniący

2000 ml

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA:

2 lata w oryginalnych opakowaniach.

HOLIFA

POLSKA

Wytwórca:
HOLIFA Polska Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 55
05-800 Pruszków
tel. 022 730 64 70
fax 022 730 64 71

Nr ID UAA2/01/2007

ISO 9001
CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 13485



04.2009

LOT

7U591080