

Hospisept[®]-Tuch

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk.

CE 0482



Producent: Lysoform GmbH Niemcy



KORZYŚCI

- szerokie spektrum biobójcze - skuteczny wobec bakterii (wraz z Tbc), grzybów oraz wirusów (wraz z HBV i HIV)
- praktyczne, pojedyncze, gotowe do użytku chusteczki - idealne do stosowania wszędzie tam, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany oraz tam, gdzie istotne jest szybkie wysychanie preparatu
- nie podrażnia skóry - chusteczki Hospisept[®]-Tuch nie wymagają ochrony rąk - w przeciwieństwie do chusteczek przeznaczonych wyłącznie do dezynfekcji powierzchni, przy stosowaniu których należy nosić rękawiczki ochronne
- praktyczne opakowanie z możliwością uzupełniania - zawiera 100 chusteczek nasączonych preparatem Hospisept

ZASTOSOWANIE

- dezynfekcja i czyszczenie małych powierzchni i wyposażenia odpornych na działanie alkoholu
- higieniczna dezynfekcja zdrowej, nieuszkodzonej skóry rąk

SPOSÓB UŻYCIA

Dezynfekcja powierzchni: powierzchnię przetrzeć chusteczką i odczekać do całkowitego wyschnięcia (ok. 5 min).

Higieniczna dezynfekcja rąk: zwilżyć ręce całkowicie na 30 sekund (w razie potrzeby, użyć 2 chusteczki).

SKŁAD

jedna nasączona preparatem dezynfekcyjnym chusteczka zawiera średnio:

Propan-1-ol 1,1 g; Ethanol 96% 0,32g; Butan-2-on, Dibutyladipat, woda oczyszczona

Opakowanie	Ilość
Puszka z op. chusteczek	100 szt.
Opakowanie chusteczek	100 szt.



Dział handlowy: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, tel./fax 0-85 743 28 97, www.medilab.pl