

# Tiutol®



Mycie i dezynfekcja narzędzi

- Do narzędzi medycznych i sprzętu stomatologicznego
- Bardzo dobre właściwości myjące
- Optymalna formuła, bez zapachu chloru
- Dobra kompatybilność materiałowa

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Tiutol®

Do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz wyposażenia stomatologicznego

## Właściwości

- Koncentrat środka dezynfekującego do ręcznego procesingu wyposażenia stomatologicznego (do mycia dezynfekującego wyposażenia do aspiracji)
- Odpowiedni do aspiratorów stomatologicznych i kolektorów amalgamatu
- Skuteczny przeciwko bakteriom, mycobakteria (M. terrae), grzybom, wirusom wyposażonym w otoczkę (w tym HIV / HCV / HIV) i wirusom bez otoczki
- Bardzo dobre właściwości myjące
- Optymalna formuła, bez zapachu chloru
- Dobra kompatybilność materiałowa

## Zastosowanie

Tiutol® to skuteczny produkt, łączący dużą siłę myjącą z odpowiednimi właściwościami dezynfekującymi. W przypadku systemów z lub bez kolektorów amalgamatu powinno się go stosować dwa razy dziennie (w połowie i pod koniec dnia). Jest to ważny element w kontekście kompleksowego bezpieczeństwa higienicznego w praktyce stomatologicznej.

Tiutol® jest stosowany z powodzeniem przez ponad 10 lat. Jego wyjątkowe właściwości myjące pomagają obniżyć koszty konserwacji i napraw.

1. Załóż rękawice
2. Napełnij wanienkę dezynfekcyjną zimną wodą i dolej potrzebną ilość preparatu Tiutol®.
3. Do świeżo przygotowanego roztworu włóż aspirator.
4. Odczekaj 30 minut. Narzędzia muszą być całkowicie zanurzone.
5. Pozostałą część roztworu użyj do umycia i dezynfekcji pojemnika do płukania (jeśli to konieczne użyj do tego celu szczoteczki).

## Skuteczność mikrobiologiczna

Mikroorganizm	Stężenie	Czas stosowania	Rozcieńczenie
B	3%	30 min.	10 ml/L
F	3%	30 min.	10 ml/L
Tbc	3%	30 min.	10 ml/L
Vaccina	1%	15 min.	10 ml/L
Polyoma SV40	1%	30 min.	10 ml/L
Polyoma SV40	2%	15 min.	20 ml/L
BVDV	1%	15 min.	10 ml/L
HBV	2%	30 min.	20 ml/L
HCV	1%	15 min.	10 ml/L
Adeno	1%	15 min.	10 ml/L
Polio	1%	15 min.	10 ml/L

**Uwaga: Nie mieszać z kwasami, innymi środkami do dezynfekcji i mycia.**

## Dostępne opakowania

kanister 5 litrów

## Numer katalogowy

18673



**Doskonała siła myjąca**

## Tiutol® – Skład:

100 g zawiera podchloryn sodu (3,9 g dostępnego jodu), wodorotlenek sodu, stabilizator, inhibitory korozji, wodę